

# | Ensemble, mobilisons les patients

## POZ 'IN' FORM **PLUS** CAREWAVE **PLUS**



CE ⓘ

Dispositifs médicaux de classe 1

### Nouvelle gamme de coussins de positionnement



### **PLUS** Complète, **PLUS** Intuitive, **PLUS** Responsable

# WIN CARE



# Le positionnement,

la mesure la plus efficace dans le cadre de la gestion des escarres

## ? Pourquoi ?

- > Aider à la prévention ou au traitement d'une escarre
- > Assurer un maintien postural
- > Corriger des postures vicieuses
- > Améliorer le confort et bien être
- > Faciliter les soins prodigués par les soignants et aidants



## Personne Pour qui ?

Population avec troubles neurologiques, handicaps physiques, conditions médicales qui affectent la mobilité/ intégrité fonctionnelle ou structurelle

Doit s'intégrer dans une approche de prise en charge holistique en combinant :




Lit médical



Matelas thérapeutique

## Quand ?

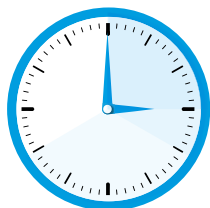

- > **Changements de position toutes les 3 heures**  
avec un matelas statique de type gaufrier
- > **Changements de position toutes les 4 heures**  
avec un matelas statique en mousse viscoélastique ou multistrates
- > **Changements de position toutes les 8 heures**  
avec un (sur)matelas à air motorisé à pression constante ou alternée ou mixte ou à perte d'air



## Le saviez-vous ?

Il existe un déficit d'accès aux coussins de positionnement, en MÀD et en EHPAD

**70%** des EHPAD ne sont pas équipés de coussins de positionnement \*

**25%** Seulement des patients éligibles ont des coussins de positionnement

Parce que les escarres sont l'affaire de tous et qu'une immobilisation prolongée entraîne des complications...

Winnicare s'engage en vous proposant une nouvelle gamme de coussins de positionnement unique & innovante :



Co-développée avec des **soignants**



Pensée pour répondre à chaque besoin **patient**



Dans l'objectif de rendre le positionnement

**PLUS** Compréhensible pour les soignants

**PLUS** Efficace pour les patients

WIN  CARE

# Une **nouvelle** gamme **PLUS complète** adaptée à chaque besoin patient et chaque environnement de soin

2 types de technologies disponibles à choisir selon le profil patient

## POZ 'IN' FORM **PLUS**



microfibres


Pour **POSITIONNER**



Mobilité réduite

> **CONFORT**

## CAREWAVE **PLUS**

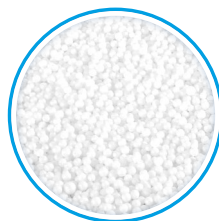

microbilles

Pour **POSTURER**



Peu de mobilité à immobile

> **SOIN**

17 formes soigneusement pensées pour couvrir tous les besoins

### Coussins **STANDARD**



### Coussins **BASE**



### Coussins **PLOT(s)**



### Coussin **décharge occipitale**




Un choix de housses parmi 3 textiles alliant confort, hygiène & technicité pour répondre aux besoins des différents environnements de soin

### Housse **Standard**



Polyuréthane haute densité

> **Facile** à nettoyer

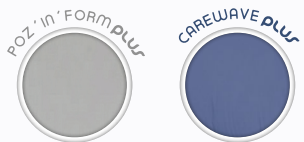

### Housse **Confort**



Fibres de cellulose 100% naturelles

> Sensation de **confort** et accueil **cocooning**



### Housse **Hygiène**



CAREWAVE **PLUS**

Polyuréthane traité aux ions argent avec soudures aux ultrasons

> Usage **multi patients sécurisé** et **facilité**



Une housse technique & Innovante !

- ▶ Traitement aux ions argent Ag+, efficace contre le développement des micro-organismes
- ▶ Soudure aux ultrasons, limite la pénétration des liquides
- ▶ Technologie **Memory Touch™** pour une répartition stable et durable des billes

Tous nos textiles sont Certifiés **OEKO-TEX** classe 1- la plus stricte, sans substances nocives, adaptés aux peaux les plus sensibles



Coussins de série de positionnement, **STANDARD**, des hanches et des genoux. Pour patients polyhandicapés en position allongée.

173,79€ sans PLV  
- CODE 6229732 -

 **Prescrit seul**

**09 & 10**

CAREWAVE plus



POZ 'IN ' FORM plus



### Coussin **STANDARD** de positionnement lateral 30° N°09 & N°10

Dimension : 180 cm x 55 cm x 5 cm



Coussin de positionnement polyvalent permettant des applications diverses :

- ▶ Placé face postérieure du patient en semi-latéral 30°, permet de décharger la pression des régions suivantes : trochantérienne, sacrum, talons, rachis internes et malléoles internes
- ▶ Placé en semi-ventral, permet de libérer les pressions sur les parties basses des poumons et obtenir un bon dégagement des voies supérieures respiratoires
- ▶ Placé sous les mollets, permet de réaliser une décharge localisée au niveau des talons
- ▶ Placé sous les cuisses permet de soulager les tensions tendino-musculaires au niveau lombaire et réaliser un relâchement de la sangle musculaire abdominale

**11**

CAREWAVE plus



POZ 'IN ' FORM plus



### Coussin **STANDARD** demi-lune N°11

Dimension : 130 cm x 80 cm x 20 cm



Coussin de positionnement polyvalent permettant des applications diverses :

- ▶ Placé derrière le buste du patient, permet de réaliser une position semi assise confortable avec buste relevé
- ▶ Placé sous les mollets, permet de réaliser une décharge de pression localisée au niveau des talons
- ▶ Placé sous les cuisses, permet de soulager les tensions tendino-musculaires au niveau lombaire et un relâchement de la sangle musculaire abdominale
- ▶ Associé à un coussin modulaire cylindrique N°06 ou un coussin modulaire triangulaire type N°12 placé(s) sous le creux des genoux, permet de réaliser une position semi fowler

**14**

CAREWAVE plus



POZ 'IN ' FORM plus



### Coussin **STANDARD** semi fowler N°14

Dimension : 70 cm x 50 cm x 10 cm



Coussin de positionnement pour position semi assise

- ▶ Placé derrière le buste, permet le maintien bilatéral du buste
- ▶ Associé à un coussin modulaire triangulaire N°12 ou un coussin modulaire cylindrique N°06 placé sous le creux des genoux, permet :
  - La réduction de la pression sur le diaphragme facilitant la respiration et à l'oxygénation
  - La réduction de la pression de contact au niveau du dos et des fesses
  - La prévention des reflux gastro-œsophagiens

**17**

CAREWAVE plus



POZ 'IN ' FORM plus



### Coussin **STANDARD** abduction des hanches N°17

Dimension : 35 cm x 28 cm



Coussin de positionnement polyvalent à placer entre les jambes, permet :

- ▶ Un maintien des hanches en abduction
- ▶ De limiter des phénomènes de frictions et de cisaillements entre les cuisses et genoux

Des outils **simples & intuitifs** pour que le positionnement devienne accessible à tous

Accéder à tous nos outils

Scan me !



- Des **conseils d'utilisation** rapidement accessibles via QR codes
- Des **brochures simples** et compréhensibles par tous
- Des **guides d'aide à la prescription** pour les prescripteurs
- Des **posters** de positions clés
- Des **vidéos** de bonnes pratiques avec des conseils & astuces
- Des formations **e-learning**



## Une gamme **PLUS responsable**, mettant **l'éco-conception** au cœur de notre démarche d'innovation



Lors de la conception de notre nouvelle gamme, nous avons réfléchi pour minimiser son impact environnemental tout au long de sa durée de vie.



**100% de fils de couleur naturel, non teintés**, utilisés pour la confection des housses. Afin d'économiser les ressources en eau, produits chimiques et énergie nécessaire à la coloration



**Des emballages recyclables**, eux-mêmes issus de **plus de 30% de matériaux recyclés**



**Des textiles naturels, de haute qualité, plus durables et plus respectueux** de l'environnement. Certifiés **OEKO-TEX** classe 1- la plus stricte, sans substances nocives, adaptés aux peaux les plus sensibles



Des produits soigneusement **conçus et fabriqués localement** sur nos sites français, En respectant **des normes rigoureuses en matière d'environnement**



Coussins de série de positionnement, **MODULAIRE**, des hanches et des genoux, **BASE**. Pour patients polyhandicapés en position allongée.

129,58€ sans PLV  
- CODE 6229749 -

 Prescrit en association avec 1 à 4 plot(s)

01 & 02

CAREWAVE plus



POZ 'IN ' FORM plus



## Coussin MODULAIRE Universel N°01 & N°02

Dimensions :

Coussin N°01 : 60 x 30 x 30 cm

Coussin N°02 : 55 cm x 40 cm x 12 cm

Coussins de positionnement polyvalent à placer au niveau des membres inférieurs et/ou supérieurs, et selon le morphotype du patient, permettant de :

- ▶ Créer des décharges de pressions localisées au niveau des points d'appuis
- ▶ D'assurer un maintien du positionnement dans la durée
- ▶ Réaliser la protection des points de contact et une réduction des phénomènes de frictions entre les malléoles, genoux, talons



06

CAREWAVE plus



POZ 'IN ' FORM plus



## Coussin MODULAIRE Cylindrique N°06

Dimension : 60 x D20 cm

Coussin de positionnement polyvalent permettant des applications diverses :

- ▶ Placé sous les genoux, permet de réduire les tensions tendino-musculaires au niveau lombaire et obtenir un relâchement de la sangle musculaire abdominale
- ▶ Placé sous les mollets, permet de réaliser une décharge localisée des talons
- ▶ Associé à un coussin modulaire circulaire N°04, permet :
  - Une protection des points de contact et une réduction des phénomènes de frictions entre les genoux
  - Un maintien des membres inférieurs en abduction



12

CAREWAVE plus



POZ 'IN ' FORM plus



## Coussin MODULAIRE Triangulaire N°12

Dimension : 60 x 30 x 30 cm

Coussin de positionnement polyvalent permettant des applications diverses :

- ▶ Placé sous les mollets, permet de réaliser une décharge de pression localisée des talons
- ▶ Placé le long du dos et associé à un coussin modulaire cylindrique N°07 ou universel N°03 placé entre les genoux, permet un positionnement semi latéral 30°



13

CAREWAVE plus



POZ 'IN ' FORM plus



## Coussin MODULAIRE Triangulaire N°13

Dimension : 45 cm x 25 cm x 25 cm

Coussin de positionnement polyvalent permettant des applications diverses :

- ▶ Placé sous un genou, permet de réduire les tensions tendino- musculaires au niveau lombaire
- ▶ Placé sous une cheville, permet de réaliser une décharge de pression localisée



15

CAREWAVE plus



POZ 'IN ' FORM plus



## Coussin MODULAIRE décharge talonnière N°15

Dimension : 80 cm x 20 cm x D15 cm

Coussin de positionnement pour décharge talonnière, permet de :

- ▶ Placé sous les talons, il permet de soulager et décharger la pression au niveau des talons
- ▶ Associé à 1 ou 2 coussins N°07 placés sous le creux du/ des genoux permet de réduire les tensions tendino-musculaires au niveau lombaire



Coussins de série de positionnement, **MODULAIRE**, des hanches et des genoux, **PLOT(s)**. Pour patients polyhandicapés en position allongée.

41,06€ sans PLV  
- CODE 6229755 -

 Prescrit en association avec 1 base et dans la limite de 4 plot(s)

03

CAREWAVE plus



POZ 'IN 'FORM plus



### Coussin MODULAIRE Universel N°03

Dimension : 45 x 20 x 8 cm

Coussin de positionnement polyvalent à placer au niveau des membres inférieurs et/ou supérieurs, et selon le morphotype du patient, permet :

- ▶ De créer des décharges de pressions localisées au niveau des points d'appui
- ▶ D'assurer un maintien du positionnement dans la durée
- ▶ De réaliser la protection des points de contact et une réduction des phénomènes de frictions entre les malléoles, genoux, talons



04

CAREWAVE plus



POZ 'IN 'FORM plus



### Coussin MODULAIRE Circulaire N°04

Dimension : 50 cm x 45 cm x D15 cm

Coussin de positionnement, utilisé en association avec le coussin modulaire cylindrique N°06 chez des patients agités, permet :

- ▶ De réaliser un maintien des hanches en abduction dans la durée
- ▶ De limiter les phénomènes de frictions entre les genoux et protéger les points de contact



05

CAREWAVE plus



POZ 'IN 'FORM plus



### Coussin MODULAIRE Demi-Circulaire N°05

Dimension : 60 cm x 35 cm x D10 cm

Coussin de positionnement, utilisé en association avec le coussin modulaire cylindrique N°06 chez des patients agités, permet :

- ▶ De réaliser un maintien des hanches en abduction dans la durée
- ▶ De limiter les phénomènes de frictions entre les genoux et protéger les points de contact



07

CAREWAVE plus



POZ 'IN 'FORM plus



### Coussin MODULAIRE Cylindrique N°07

Dimension : 45 cm x D12 cm

Coussin de positionnement polyvalent permettant des applications diverses :

- ▶ Placé entre les malléoles, genoux, talons, permet de réaliser une protection des points de contact et une réduction des phénomènes de frictions



08

CAREWAVE plus



POZ 'IN 'FORM plus



### Coussin MODULAIRE Déclive N°08

Dimension : 40 x 20 cm x 9 cm

Coussin de positionnement polyvalent permettant des applications diverses :

- ▶ Placé au niveau des membres inférieurs et /ou supérieurs chez un patient non agité, permet :
  - De créer des décharges de pressions localisées
  - D'assurer le calage du patient dans une position choisie



# Caractéristiques techniques

Dénomination	Classification	Forme	Taille en cm (Lxlxh ou Diam)	Housse		
				PROMUST PUHD	Lenzing FR	PROMUST C.I.D
Coussin MODULAIRE universel	BASE	01	45 x 30 x 10	•	•	•
	BASE	02	55 x 40 x 12	•	•	•
	PLOT	03	45 x 20 x 8	•	•	•
Coussin MODULAIRE Circulaire	PLOT	04	50 x 45 x D10	•	•	•
Coussin MODULAIRE Demi-circulaire	PLOT	05	60 x 35 x D10	•	•	•
Coussin MODULAIRE Cylindrique	BASE	06	60 x D20	•	•	•
	PLOT	07	45 x D12	•	•	•
Coussin MODULAIRE Déclive	PLOT	08	40 x 20 x 9	•	•	•
Coussin STANDARD de positionnement lateral 30°	STANDARD	09	180 x 55 x 15	•	•	•
	STANDARD	10	170 x 80 x 15	•	•	•
Coussin STANDARD Demi-lune	STANDARD	11	130 x 80 x 20	•	•	•
Coussin MODULAIRE Triangulaire	BASE	12	60 x 30 x 30	•	•	•
	BASE	13	45 x 25 x 25	•	•	•
Coussin STANDARD Semi fowler	STANDARD	14	70 x 50 x 10	•	•	•
Coussin MODULAIRE Décharge talonniere	BASE	15	80 x 20 x D15	•	•	-
Coussin Décharge Occipitale	-	16	50 x 40 x D10	•	•	-
Coussin STANDARD Abduction des hanches	STANDARD	17	35 x 28	•	•	•


### Références

#### POZ 'in' FORM plus

Structure des références :  
VPOZ[N°Coussin][Housse]

 SG (Housse) Standard Gris
  CG (Housse) Confort Gris

**Exemple :**  
Coussin MODULAIRE Triangulaire N°12  
Housse Standard Gris  
Référence : VPOZ12SG



#### CAREWAVE plus

Structure des références du coussin avec les housses Standard Bleu et Hygiène Bleu :  
VCAR[N°Coussin][Housse]

 SB (Housse) Standard Bleu
  HB (Housse) Hygiène Bleu

**Exemple :**  
Coussin STANDARD demi-lune N°11  
Housse Standard Bleu  
Référence : VCAR11SB



Structure de la référence sur housse Confort Bleu vendue séparément :  
VHCAR[N°Coussin]CB

 CB (Sur housse) Confort Bleu

**Exemple :**  
Sur housse Confort Bleu pour coussin STANDARD demi-lune N°11  
Référence : VHCAR11CB



WINCARE France  
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)

Site de production  
Miniac-Morvan (35)



Dispositifs médicaux de classe I



## Le saviez-vous ?

Dans les indications d'aide au traitement de l'escarre, les dispositifs de décharge localisée ou de positionnement associés aux matelas thérapeutiques sont obligatoires. Le cas échéant, elle peut être associée à l'intervention d'auxiliaires médicaux. (HAS).

## Exemple ordonnance



winnicare.fr



oxtair automorpho plus



Docteur Lorem IPSUM  
134 Euphratensis discrevimus  
34850 Samosata-dictum  
Tél + 31 (0)7 85 02 10 64  
lorem-ipsum@lorem-ipsum.fr

Mardi 12 Mai 2024

L'état de santé de M ou Mme X nécessite la délivrance d'un coussin de positionnement des hanches et des genoux, STANDARD ou MODULAIRE base + (N) plot(s) pour un usage en position allongée