


MARINA

Mode d'emploi

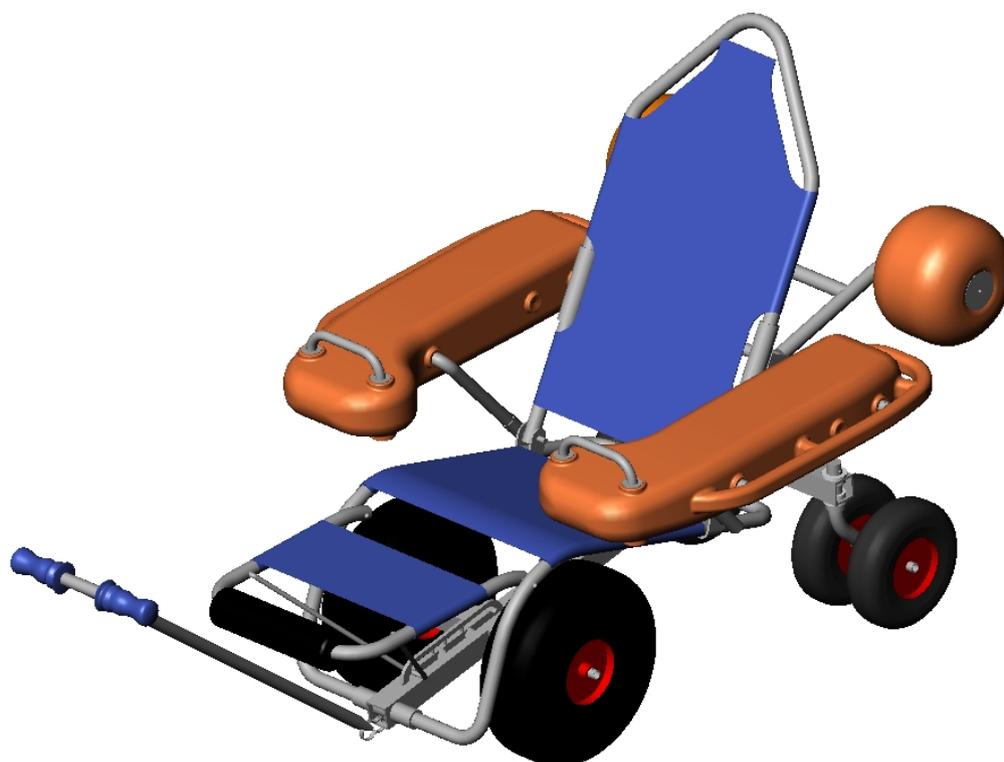

IDENTIFICATION DU PRODUITFabricant:

Nom: Virmedic

Adresse: Cl Perellonet nº 1
E-46909 TORRENTE (Valencia – ESPAGNE)

Téléphone: +34 961 565 521

Fax: +34 961 560 383

Courriel: ventas@virmedic.com

IDENTIFICATION DU MODELE

Fauteuil roulant amphibie modèle **MARINA-ANFI**.

FONCTION

Aide Technique destinée à faciliter l'accès aux plages et au bain des personnes à mobilité réduite.

DESCRIPTION DU PRODUIT


MARINA-ANFI est un fauteuil roulant amphibie qui peut être utilisé aussi bien dans l'eau qu'à l'extérieur. Il a été spécialement étudié pour faciliter l'accès à la plage et aux bains de mer aux personnes à mobilité réduite.

Deux caractéristiques importantes le différencient d'un fauteuil roulant conventionnel: il dispose de flotteurs et de roues extra larges. Les flotteurs sont nécessaires à la flottabilité adéquate dans l'eau et les roues extra larges évitent que le fauteuil ne s'enfonce dans le sable.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE MARINA-ANFI

Dimensions (<i>larg. x haut. x long.</i>)	1120 x 1200 x 1670 mm (repose-pied en position la plus haute). 1120 x 1200 x 1470 mm (repose-pied en position la plus basse).
Poids du fauteuil	37.250 Kg
Poids maximum de l'utilisateur	100 Kg
Matériau de la structure	Aluminium
Flotteurs	Latéraux Polyéthylène empli de polyuréthane expansé. Arrières Polyéthylène.
Toile Dossier & Assise	Fibre de polyester enduite de PVC.
Roue arrière Ø400	Pression gonflage 36 PSI (lbf/pouce ²) ó 2.5 Kg/cm ²
Roue avant Ø250	Pression gonflage 30 PSI (lbf/pouce ²) ó 2.1 Kg/cm ²


PIECES PRINCIPALES DU FAUTEUIL MARINA-ANFI

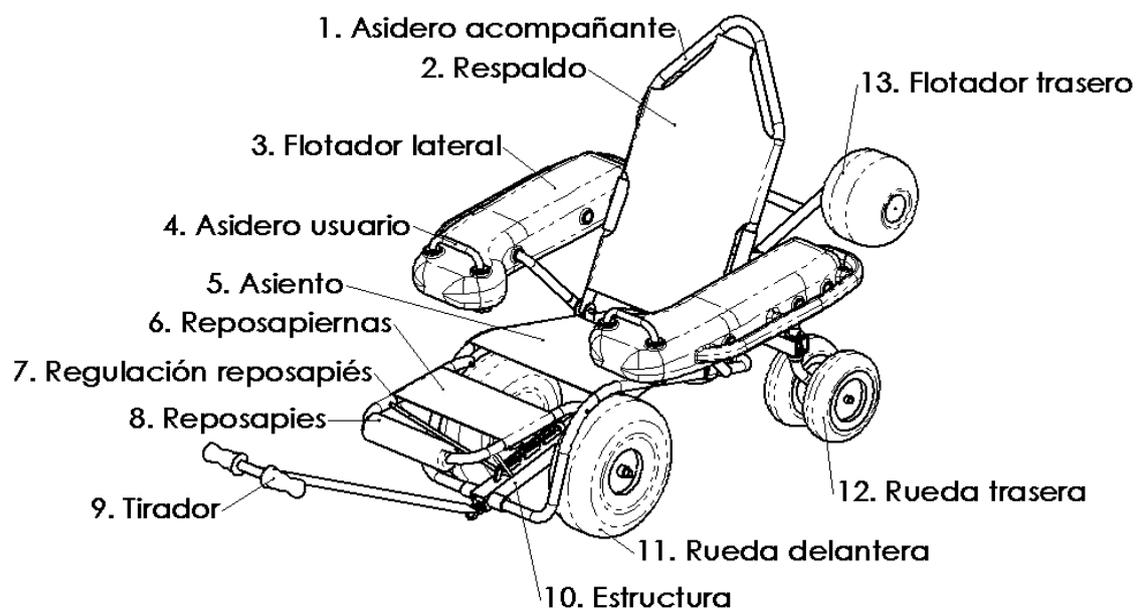


1. Poignée accompagnant
2. Dossier
3. Flotteur latéral
4. Poignée utilisateur
5. Assise
6. Repose-jambes
7. Réglage reposer-pied
8. Reposer-pied
9. Barre de traction
10. Structure portante
11. Roue avant
12. Roue arrière
13. Flotteur arrière

DEMONTAGE DU MARINA-ANFI



1. **Démonter les flotteurs latéraux.**
Retirer les goupilles et enlever les flotteurs.

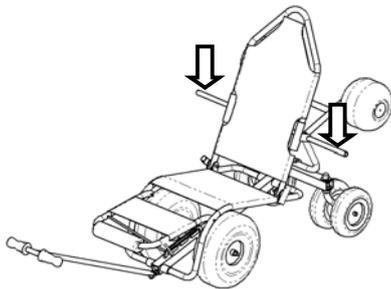

2. **Lever la tige bloquante.**
3. **Rabattre le dossier.**

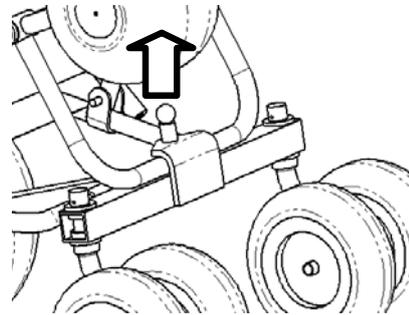

4. **Descendre le repose-pied.**
5. **Retirer l'axe d'articulation du dossier.**
6. **Enlever les flotteurs arrière.**

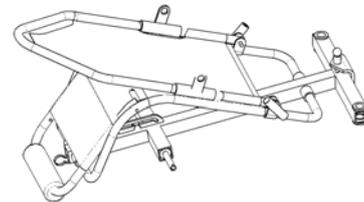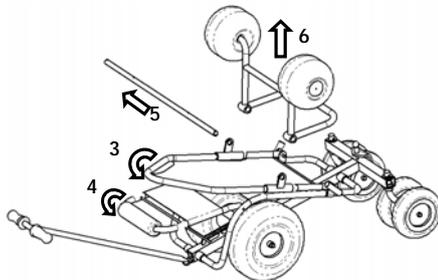

7. **Démonter les roues avant.**
8. **Démonter les fourches arrière.**
9. **Enlever la tige bloquante.**

MODE D'EMPLOI

Vérifications préalables à l'utilisation: Vérifier le fonctionnement correct de l'unité.


- La **fixation arrière du fauteuil** doit être correctement bloquée avec la tige bloquante enfoncée jusqu'au bout.
- Les **goupilles de fixation** sont bien mises et verrouillent les **flotteurs**.
- Les **goupilles de fixation** sont bien mises et verrouillent les **roues**.
- Le **repose-pied** est convenablement réglé pour ne pas faire obstacle. Il dispose de quatre positions: la plus basse pour le transfert et les trois autres pour le déplacement sur le sable ou dans l'eau.

Fonctionnement du MARINA-ANFI

- Transferts

Les transferts peuvent être réalisés de manière frontale ou latérale.

Pour les utilisateurs gardant le contrôle des membres inférieurs les transferts peuvent se faire frontalement avec l'aide de l'accompagnant, en pensant à **rabattre totalement le repose-pied**. Pour déplacer le fauteuil sur le sable ou pour entrer dans l'eau, ce dernier pourra être relevé à la hauteur idéale pour l'utilisateur.

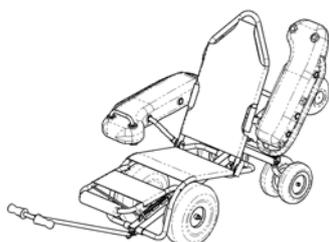

Pour les utilisateurs n'ayant pas ou peu de contrôle des membres inférieurs, les transferts se réaliseront latéralement. Pour cela il faut d'abord **relever l'un des flotteurs après** avoir ôté la goupille de la barre d'appui. S'appuyer à la structure de l'assise pour réaliser le transfert. Une fois l'utilisateur assis, il faut remettre le flotteur dans sa position première. Vérifier que la barre d'appui du flotteur soit bien bloquée par la goupille.

- Manœuvre et déplacements

Le fauteuil amphibie **MARINA-ANFI** se peut être déplacé sur n'importe quel type de surface. Sur sols mous et pour entrer ou sortir de l'eau, l'on peut tirer le fauteuil grâce à la barre de traction tout en poussant au niveau du dossier. Sur sols durs, il est conseillé de pousser le fauteuil au niveau du dossier pour avoir un meilleur contrôle des roues directrices.

- Flottabilité et stabilité dans l'eau

Le fauteuil amphibie **MARINA-ANFI** est doté d'un système de flotteurs composé de plusieurs éléments. Dans des conditions de mer calme, ils offrent une stabilité et une flottabilité adéquates. La stabilité maximale du fauteuil est obtenue lorsque la personne repose le dos contre le dossier.

L'accompagnant pourra aider à monter ou descendre du fauteuil **MARINA-ANFI** dans l'eau en le contrôlant et en le maintenant à flot.

- Réglage du repose-pied

Le repose-pied peut être réglé en plusieurs positions, depuis la plus basse où il touche presque le sol, à la plus haute qui se rapproche de la ligne de l'assise. **Durant les transferts le repose-pied doit être complètement rabattu.**

Une fois le transfert réalisé, régler le repose-pied à la hauteur souhaitée par l'utilisateur.

Maintenance et vérifications périodiques nécessaires

- *Nettoyage*

Rincer abondamment le fauteuil à l'eau douce après chaque jour de plage.

MESURES DE SECURITE ET MISES EN GARDES

Etat de la mer. Le fauteuil amphibie Marina-Anfi ne doit pas être utilisé dans une mer agitée ni avec courants forts (ne jamais l'utiliser lorsque le drapeau est rouge et prendre un maximum de précautions lorsque ce dernier est jaune).

Utilisation d'un gilet de sauvetage. Il est recommandé que l'utilisateur mette toujours un gilet de sauvetage lors du bain.

Par sécurité il est recommandé qu'un accompagnant soit toujours présent afin de retenir le fauteuil dans l'eau.

Entrée et sortie de l'eau. Afin d'assurer une stabilité maximale, il est recommandé de toujours entrer dans l'eau face à la mer et en sortir dos à la mer.



Toute suggestion afin d'améliorer les versions futures du fauteuil **MARINA-ANFI** peut être faite en prenant contact avec le fabricant.

Nom: Virmedic

Adresse: Calle Perellonet nº 1
E-46909 TORRENTE (Espagne)

Téléphone: +34 961 565 521

Fax: +34 961 560 383

Courriel: ventas@virmedic.com