


À commander sur le site (35) Miniac-Morvan



Score sur l'Échelle de Braden

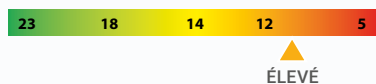

## INDICATIONS HAS

Support de fauteuil d'aide à la prévention de l'escarre chez les patients à risque **MODÉRÉ** à **ÉLEVÉ** de survenue d'escarre (selon jugement clinique et échelles), sans asymétrie d'appui et sans risque de « glissé avant ».

20 ≤ 100 kg  
pour les largeurs ≤ 45 cm

20 ≤ 110 kg  
pour les largeurs ≥ 46 cm



NORMES FEUX  
EN 597 part 1 & 2

	CODE LPPR	TARIF AVEC PLV (€TTC)
Coussin KALLI VISCO, standard	1231233	69,00
Coussin KALLI VISCO, standard < 38cm	1272344	81,00
Coussin KALLI VISCO, standard < 45cm	1262713	81,00

## LES + PRODUIT


- Versatile: convient à tous types de patients
- Galbé: pour une bonne stabilisation du bassin
- Nombreuses tailles et largeurs / profondeurs

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ Coussin moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme (80kg/m<sup>3</sup>) favorisant l'immersion du corps dans la matière pour augmenter les points de contact et réduire ainsi les valeurs de pressions maximales
- ▶ Épaisseur de mousse viscoélastique sous les ischions de 6 cm
- ▶ Galbe au niveau des cuisses pour favoriser leur bon alignement
- ▶ Housse de protection amovible, extensible, et respirante pour une thermorégulation lors d'une assise prolongée.
- ▶ Base de la housse inférieur anti-dérapante pour garantir un bon maintien du coussin sur l'assise
- ▶ 1 hauteur : 8cm, plusieurs largeurs et profondeurs
- ▶ Coussin KALLI VISCO livré avec 2 housses PHARMATEX

Une bonne répartition des pressions en alliant un bon positionnement et un confort en position assise

## Mousse viscoélastique

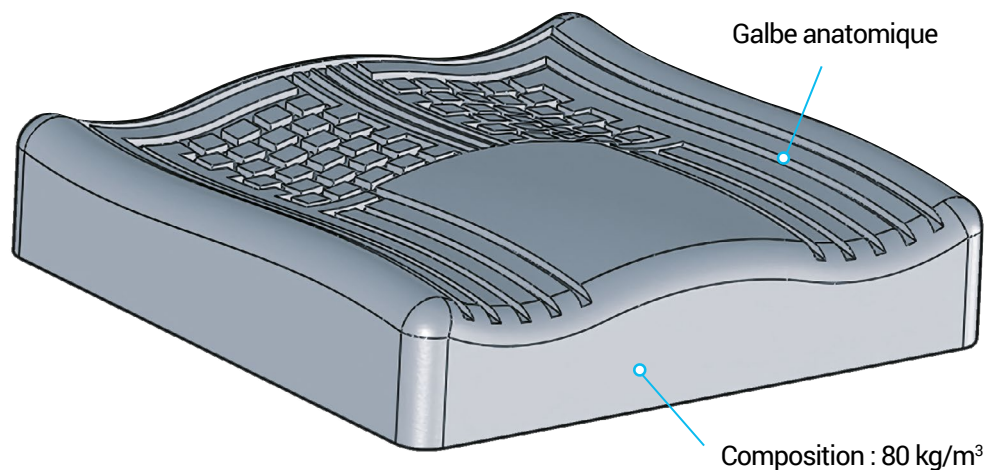

### Conseils d'entretien du coussin

- ▶ Éponge et eau savonneuse ou produit désinfectant
- ▶ Nettoyage vapeur saturante sans ajout de formol
- ▶ Bien laisser sécher à l'air libre avant de remettre la housse



### Les conseils de Sonia Baudry

*Ergothérapeute D.E.*

"Je recommande le Kalli visco aux personnes qui ont besoin de repères anatomiques pour s'installer correctement au fauteuil. Ce coussin prévient le risque de formation d'escarres lié à un mauvais positionnement du bassin et des membres inférieurs."

DIMENSIONS (lxPxH)	RÉFÉRENCES	HOUSSE DE RECHANGE
34 x 36 x 8 cm	17.17209	17.17209H
34 x 38 x 8 cm	17.17212	17.17212H
36 x 36 x 8 cm	17.17214	17.17214H
36 x 38 x 8 cm	17.17216	17.17216H
37,5 x 38 x 8 cm	17.17234	17.17234H
38 x 42 x 8 cm	17.17217	17.17217H
40 x 40 x 8 cm	17.17294	17.17294H
40 x 42 x 8 cm	17.17218	17.17218H
40 x 45 x 8 cm	17.17219	17.17219H
42 x 38 x 8 cm	17.17228	17.17228H
42 x 40 x 8 cm	17.17226	17.17226H
42 x 42 x 8 cm	17.17295	17.17295H
42 x 45 x 8 cm	17.17227	17.17227H
43 x 44 x 8 cm	17.17267	17.17267H
45 x 40 x 8 cm	17.17225	17.17225H
46 x 45 x 8 cm	17.17235	17.17235H
48 x 40 x 8 cm	17.17229	17.17229H
48 x 43 x 8 cm	17.17236	17.17236H
48 x 45 x 8 cm	17.17271	17.17271H
50 x 45 x 8 cm	17.17299	17.17299H