


À commander sur le site (30) Nîmes



Score sur l'Échelle de Braden

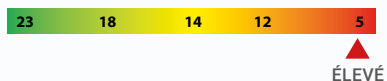

axtar automorpho®  
sensor COUSSIN

## INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à **RISQUE MOYEN À ÉLEVÉ**, antécédents d'escarre ischiatique ou sacro-coccygienne, paralysie du tronc et/ou des membres inférieurs, spasticité, troubles de la sensibilité des membres inférieurs, asymétrie modérée d'appui frontale ou sagittal, amputé vasculaire.

 30 ≤ 150kg



NORMES FEUX  
EN 597 part 1 & 2  
GPEM/CP D1-90 Classe D




## LES + PRODUIT


- Amélioration de la qualité de soins et de vie du patient.
- Simplicité d'utilisation pour le personnel soignant.

## CARACTÉRISTIQUES COUSSIN

- ▶ 6 cellules d'air de 10 cm de hauteur
- ▶ Mode de fonctionnement: dynamique 1 cellule sur 2 à l'exception de la première qui est statique pour garantir une stabilité et éviter le glisser avant
- ▶ Housse PROMUST CIC

Coussin et compresseurs vendus séparément

| HOUSSE  | DIMENSIONS (LxPxH) | RÉFÉRENCES    |
|---|--------------------|---------------|
|  | 45 X 45 X 10 cm    | VAXT6/CO/AUTO |

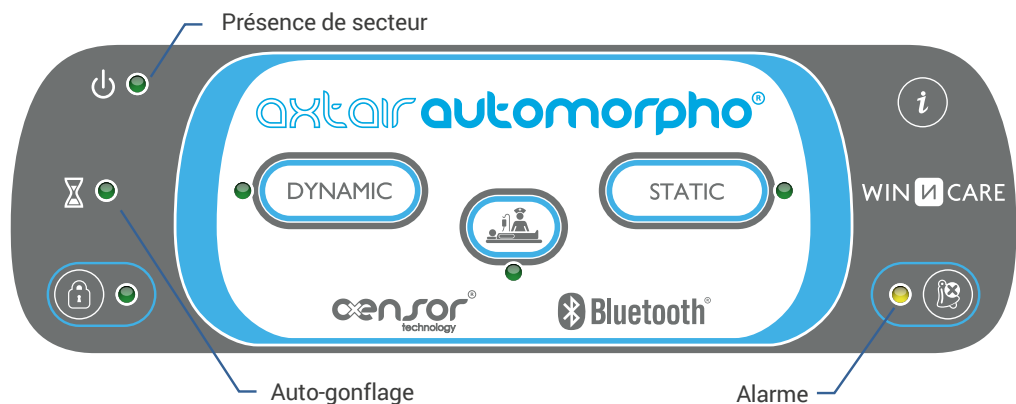

## CELLULES

- ▶ 6 cellules en Polyuréthane
- ▶ Ensemble faisceaux-cellules amovible: facilite le nettoyage et la désinfection du coussin

## QUALITÉ | SOLIDITÉ | SILENCIEUSES



### VERROUILLAGE clavier

Pour déverrouiller/verrouiller le clavier, appuyer sur la touche jusqu'à ce que le voyant change d'état



### Le mode « SOINS »

N'est pas activable lorsqu'un coussin est raccordé sur le compresseur



### Le mode « DYNAMIC »

Mode thérapeutique avec alternance d'une cellule sur deux. La 1ere cellule du coussin (*devant*) reste en statique



### Le mode « STATIC »

N'est pas activable lorsqu'un coussin est raccordé sur le compresseur. Ce mode peut être obtenu en déconnectant le coussin du compresseur

